

PRE READING

Présentation

Tarifs conseillés

A prévoir le jour de la  
formation

# PRÉSENTATION

**Radio fréquence et cavitation** pour la prise en charge esthétique de la Silhouette peut être utilisé dans les salons de beauté.

## INDICATION

Relâchement visage et corps  
Cellulite corps

## AVANTAGES

Effet immédiat  
Non-invasif  
Sans douleurs

## LA RADIOFRÉQUENCE : les ondes électromagnétiques

Ce sont des ondes électromagnétiques thermiques (5mhz) à multiples fréquence qui passent à travers la peau et qui produisent de la chaleur dans les tissus sous cutanés pour agir en profondeur.

- Traitement du relâchement cutané en maintenant une température entre 40,5 et 41°C.

Stimulation des fibroblastes, lesquels vont fabriquer de nouvelles fibres d'élastine et de collagène ce qui va améliorer la fermeté et la tension cutané.

L'effet de rétractation sur les fibres de collagène préexistante est immédiate donnant un coup d'éclat visible et une meilleure fermeté.

La rétraction se poursuit dans le temps.

- Traitement des cellulites profondes en maintenant la température à 43°C

Stimulation et accélération du processus de lipolyse pour réduire la graisse qui va être éliminé par les émonctoires naturelles.

## PROTOCOLES :

Radiofréquence : 1 séance par semaine pendant un mois puis 1 séance tous les 15 jours le mois suivant (entretien annuel à prévoir selon âge, type de peau, mouvements hormonaux, agression spécifique des tissus (soleil, tabac...)).

# CAVITATION : Ultrasons de basses fréquences

Cet appareil utilise les ultrasons de basses fréquences (dits de cavitation) qui en raison de l'effet cytolytique des ondes de pression sur les membranes des cellules graisseuses permet d'obtenir une réduction importante des surcharges graisseuses localisées.

L'unité d'amincissement de cavitation vous permet aussi de réduire la cellulite grâce à des ondes électromagnétiques de haute fréquence (5MHz).

## **PROTOCOLE :**

Cavitation : 1 séance tous les 15 jours de 1 à 3 zones pour enlever 1 cm de plis cutané par séance.

## CONTRE-INDICATIONS RF

Grossesse

Maladie cardiaque grave

Stimulateur cardiaque

Maladie circulatoire grave avec phlébite ou lymphœdème récidivant (visage et cou autorisé)

Maladie inflammatoire ou de système phase aigue ou chronique grave

Traitement cortisone au long cours

Maladie hémorragique grave et récidivante

Système immunitaire déficient (SIDA...) ou maladie auto immune

Insuffisance rénale ou hépatique grave

Cancer évolutif

Lésions cutanées sur la zone à traiter

Urticaire cholinergique ou maladie bulleuse

## CONTRE-INDICATIONS LIPOCAVITATION

Anomalies de la peau : grain de beauté, lésion, bouton de fièvre... (si sur la zone à traiter...)

Femme enceinte et enfant/ado prépubère (par principe de précaution)

Eviter le soleil quelques jours avant la séance

Tatouage (sur la zone du traitement)

Médicaments Photo sensibilisants

# TARIFS CONSEILLÉS

## TARIFS RF

ZONE	PRIX SÉANCE	FORFAIT x6*
Visage + cou	80 €	400 €
Visage + cou + décolleté	100 €	500 €
Corps - 1 zone	100 €	500€
2 zones		-10% de remise
3 zones		-20% de remise

\* Tarifs conseillés - Pour 6 séances achetées dont une séance offerte.

## TARIFS ULTRASONS DE CAVITATION

ZONE	PRIX SÉANCE	CURE 4 à 6* séances
Corps	60 €	4 séances 200 € 6 séances 300 €

## TARIFS SOINS COMBINÉS (CAVIT+RF)

Cure	Prix
6 séances RF + 4 séances cavitation	650 €

# PREVOIR LE JOUR DE LA FORMATION

## A PRÉVOIR PAR LA PRATICIENNE

Gant en nitrile non poudré  
Charlotte ou bandeau cheveux  
Cotons / Compresses non tissées 10 x 10  
Lotion micellaires démaquillante  
Spatule ou abaisse langues  
Alcool 70°  
Crayon Blanc à maquillage (Déterminer les zones)  
Gel échographique de bonne qualité (5 litres)  
Glycérine  
Bol / Pinceau à fond de teint

## Modèles :

2/ 3 modèles - Visage 45min  
zones corps cellulite (2 zones)  
zones corps cavitation (2 zones)

- PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE SUR LE DISPOSITIF \_\_\_\_\_  
1 JOUR

## **PUBLIC CONCERNE**

- Esthéticiennes et praticiennes de bien être, personnel des instituts d'esthétique et de toute structure recevant des client(e)s dans un but esthétique, de bien-être, de remise en forme
- Professionnels de santé

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : me consulter

## **PRE REQUIS :**

- D'être équipé du dispositif \_\_\_\_\_ ou être employé(e) d'un centre ou institut équipé de la technique
- Savoir répondre au quiz de positionnement début de formation

## **OBJECTIFS DE LA FORMATION**

Connaitre et acquérir les techniques d'utilisation, connaissances et savoir-faire nécessaire sur l'utilisation du dispositif

**DATE DE LA FORMATION/ Délai d'accès – me consulter**

## **CONTENU DE LA FORMATION**

MATIN 1 : 9h à 12.30h

Présentation – organisation de la formation

Diaporama détaillé de la technique

Avantage et mise en œuvre de(s) la technique(s) et comparaison et association avec les techniques manuelles

APRES MIDI 1 : 14h à 17.30h

La théorie en complet – book de formation et diaporama power point

Démonstration sur modèle et explications des gestes sur modèle

Mise en pratique de la technique, corrections et ajustements et analyse des résultats

## **METHODE PEDAGOGIQUE**

La formatrice possède plusieurs diplômes esthétiques et pratiquent depuis de nombreuses années. La méthode travaille sur l'apprentissage pas à pas avec des contrôles en continu qui valident chaque étape.

## **DEROULEMENT DE LA FORMATION**

Durée : 7 heures Horaires : 9h à 12.30h et 14h à 17.30h

Lieu : dans le centre du client ou me consulter

Formateur : Clémence Amoura

- Coût total : demander un devis/ me consulter Coût horaire : me consulter

## **SUIVI ET EVALUATION**

QCM et validation des acquis par la formatrice en fin de formation.

**REFERENT** (pour personne en situation d'handicap)

Clémence – email : clesthetic@outlook.com

•  
Clémence Amoura

175 Boulevard du général delambre – 95100 ARGENTEUIL – 06 99 38 43 40 – clesthetic@outlook.com

SIRET : 94887849100018